

Ficha técnica

Silla de ruedas plegable

Descripción:

La silla de ruedas es uno de los medios de asistencia de uso más frecuente para mejorar la movilidad personal, condición previa para disfrutar de los derechos humanos y una vida digna, y ayuda a las personas con discapacidad a convertirse en miembros más productivos de sus comunidades. Para muchos, una silla de ruedas adecuada, bien diseñada y armada puede constituir el primer paso hacia la inclusión y participación en la sociedad. Elemento importante para utilizar en caso de emergencia, donde hay personas que no pueden valerse por sí misma.

Características:

- Su marco plegable facilita el transporte y el almacenamiento.
- Su llanta en pasta tipo radial es ideal para diferentes ambientes.
- Tiene estructura de acero martillado la cual permite mayor durabilidad.
- Cuenta con reposapiés movibles para comodidad del usuario.
- Sus frenos de mano son de fácil accionamiento.

Presentación:

Descripción	Color	Material	EAN 13	Contenido
Silla de ruedas plegable	Azul	Acero	8435454002997	1 unidad /Ctn
Silla de ruedas plegable	Negro	Acero	8435454002980	1 unidad /Ctn

Normativa:

- Reglamento (EU) 2017/745

Instrucciones de uso:

- Antes de usar la silla compruebe su estabilidad al intentarla mover rigurosamente.
- Colóquese lo más cercana posible del lugar donde desea ubicarse.
- Al transferirse, colóquese en la parte posterior del asiento para evitar estropear la tornillería el tapizado hacer bascular la silla hacia delante.
- Accione los dos frenos, no deben ser utilizados como soporte para las transferencias.
- Para más detalles, por favor leer el manual.

Limpieza y mantenimiento:

- Siempre utilice un paño limpio y húmedo para limpiar la silla diariamente.
- Evite el contacto con sustancias corrosivas, tales como cloro
- Examinar la presión de las llantas semanalmente
- Revisar que los frenos de las llantas se activen fácilmente
- Examinar que las llantas no estén tambaleando, mal alineadas o sueltas
- Examinar si hay tornillos sueltos
- El producto debe almacenarse en un ambiente seco, alejado de la radiación solar.



Ítem	Pieza	Ítem	Pieza
1	Empuñadura	7	Reposapiés
2	Respaldo	8	Rueda delantera
3	Reposabrazos	9	Pivote delantero
4	Asiento	10	Freno
5	Reposapiernas	11	Aros de empuje
6	Reposapiernas	12	Rueda trasera

Overall Length (cm)	Overall Width (cm)	Overall Height (cm)	Overall Width Folded	Seat Width (cm)	Seat Depth (cm)	Back Height (cm)	Floor to Seat Height	Weight Capacity (kg)	Front Caster Spec.	Rear Wheel Spec.	G./N. Weight (kg)
103	61	91	26.5	46	40	43	50	120	8"	24"	21.5/19.0

Parámetros de rendimiento:

- Carga nominal: 125kg
- Radio de giro mínimo: $\leq 0,85$
- Estabilidad estática: (vertical) $\geq 10^\circ$, (lateral) $\geq 15^\circ$
- Diámetro de la rueda trasera: 610mm
- Eficiencia de los frenos: $\geq 8^\circ$

 **SUNMED** *Quality Products for a healthy life!

SUNMED TECHNOLOGY SL
 CIF: B01654029
 Av. De las Morcillas 33
 28343 Valdemoro (Madrid) – España
 Tel: +34-913 892 300
 +34-913 892 301

Información Logística

Silla de ruedas plegable

EAN 13


8435454002997

8435454002980



Expositor:

Presentación: 1 unidad/expositor

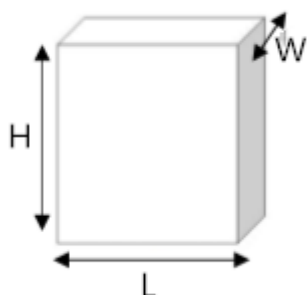


Cartón:

Presentación: 1 unidad /Ctn

Tamaño de cartón:

82cm(L)x27cm(W)x94cm(H)

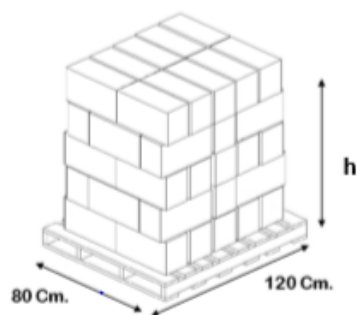

Palé

Palé para almacenar y enviar:

Presentación: 7 Ctns/palé

Tamaño de palé: 120cm x 80cm x 199cm(h)



SUNMED *Quality Products for a healthy life!

SUNMED TECNOLOGY SL

CIF: B01654029

Av. De las Morcillas 33

28343 Valdemoro (Madrid) – España

Tel: +34-913 892 300

+34-913 892 301